

PASSOS PARA
INSTALAR O
VISUALIZADOR
IMPLANT
VIEWER






Passo 1 - Insira o CD ou abra o arquivo pelo e-mail que você recebeu


Passo 2: Selecione a pasta AUTOPLAY

Este Computador > Unidade de DVD-RW (D:) Disc >

Easy Photo Print > Photo Print


Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
✓ Arquivos no Disco (3)			
 AutoPlay	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
 AutoPlay	01/11/2007 06:02	Aplicativo	958 KB
 autorun	23/04/2012 16:16	Informações de c...	1 KB

Passo 3- Clique em DOCS

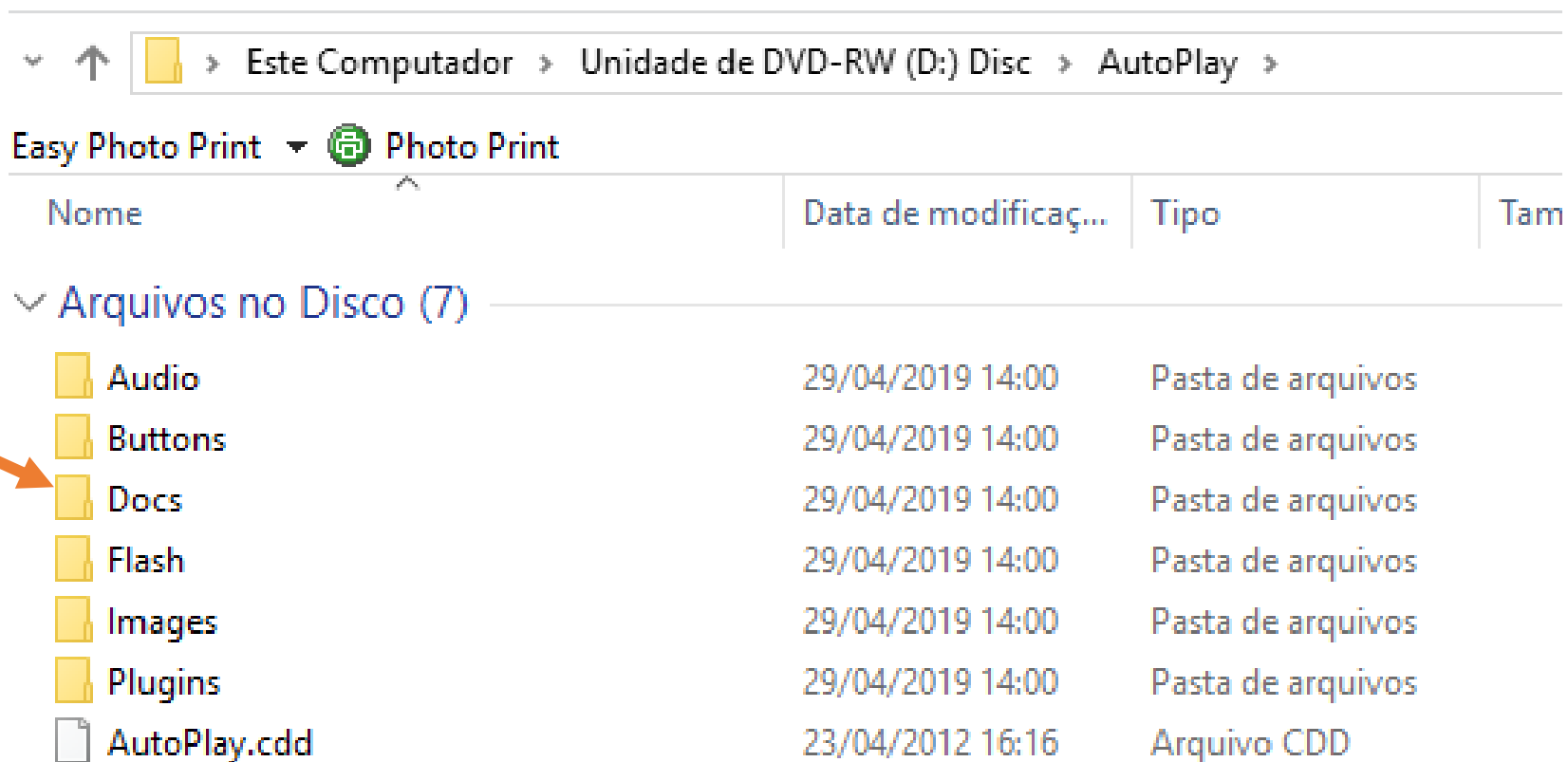


File Explorer path: Este Computador > Unidade de DVD-RW (D:) Disc > AutoPlay >

Easy Photo Print | Photo Print

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tam
Arquivos no Disco (7)			
Audio	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Buttons	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
 Docs	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Flash	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Images	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Plugins	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
AutoPlay.cdd	23/04/2012 16:16	Arquivo CDD	

Passo 4- Instale o visualizador em seu micro (ESTE PASSO É FEITO UMA ÚNICA VEZ (A PRIMEIRA VEZ)).

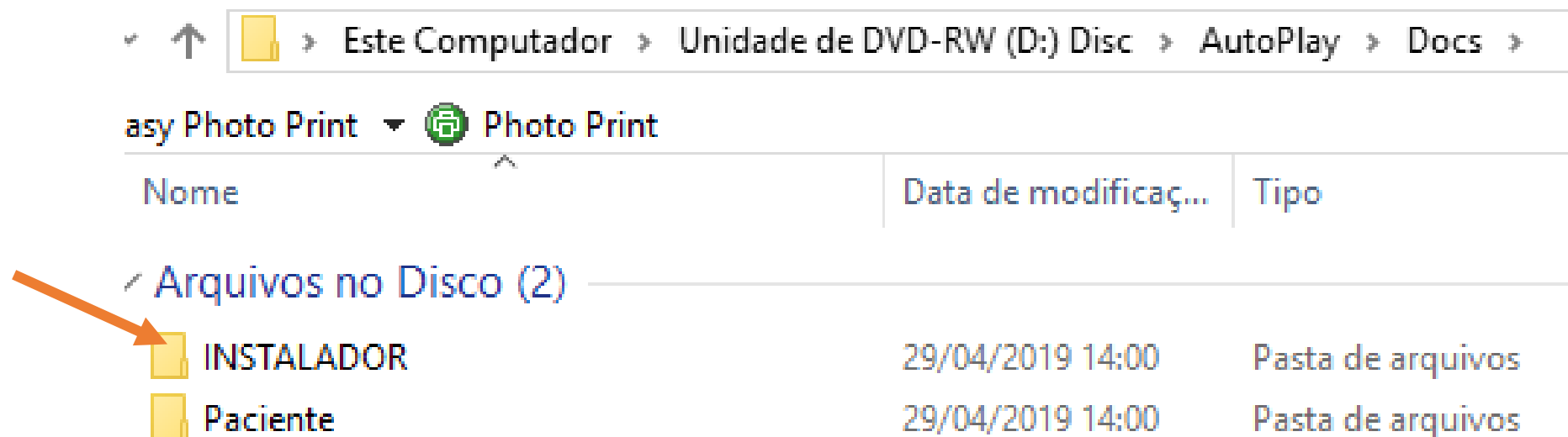


File Explorer breadcrumb: Este Computador > Unidade de DVD-RW (D:) Disc > AutoPlay > Docs


asy Photo Print Photo Print

Nome	Data de modificaç...	Tipo
Arquivos no Disco (2)		
INSTALADOR	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos
Paciente	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos


Passo 5- Clique no implantViewer , irá aparecer uma tela pedindo permissão para a instalação- CLIQUE ACEITAR

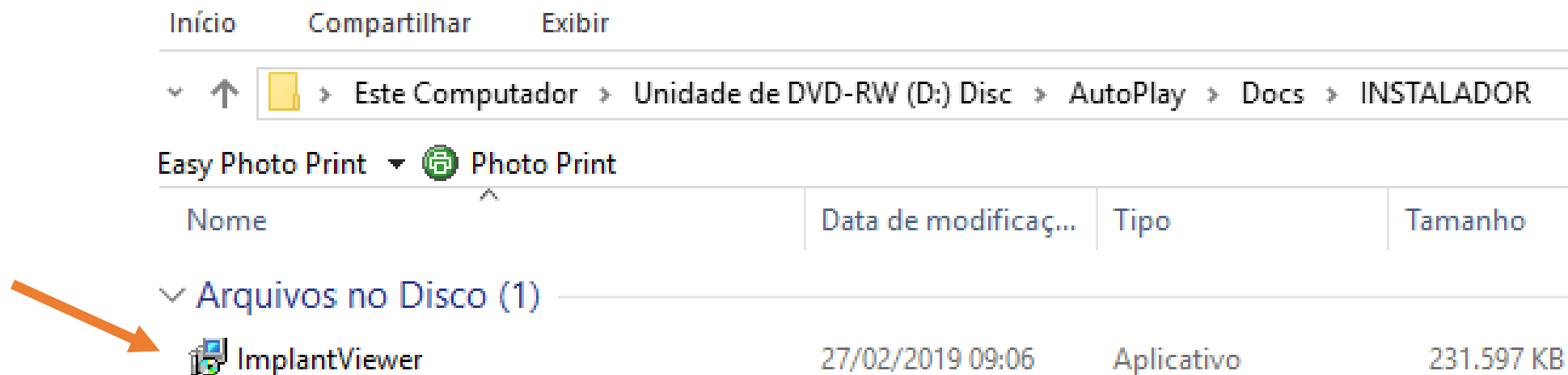

Passo 6- Seleção o idioma

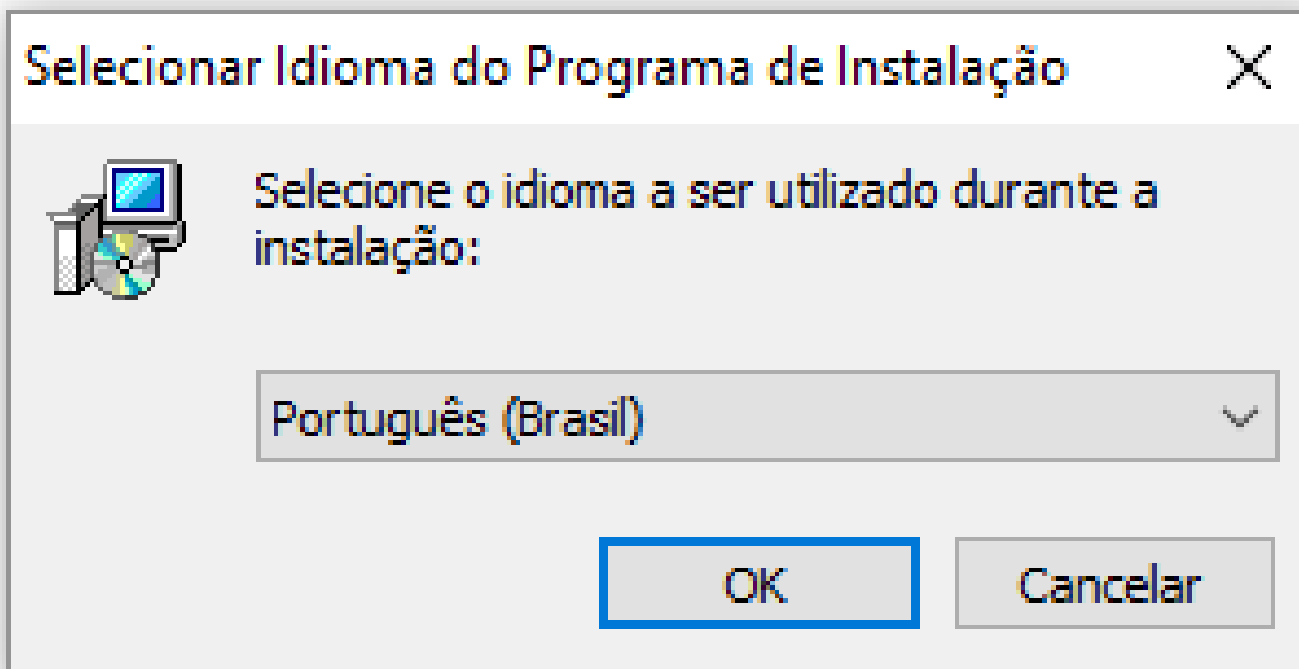

Passo 7- Selecione eu aceito os termos e clique em avançar (duas vezes)

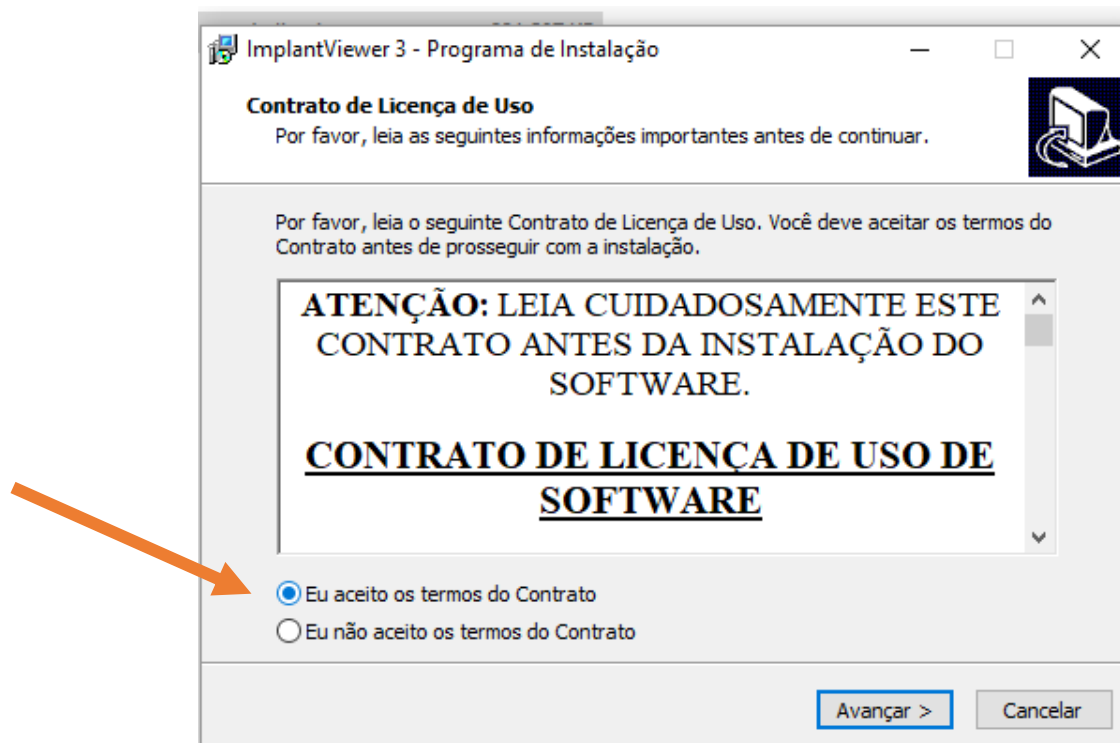

Passo 8- Crie um ícone na área de trabalho e o visualizador estará disponível!

